

人工透析装置用除菌剤(過酢酸系)

NEW

プレモーブ-ネイチャー

PREMOVE-NA

優れた除菌・洗浄効果、除錆効果を示し、
バイオフィルム形成を予防する
有機物、炭酸塩の除去性を高め清浄化に貢献

[主成分] 過酢酸(2.2~2.4%)、過酸化水素(6%未満)、酢酸(約23.5%)
無機酸、除錆剤

プレモーブBCの主成分は過酢酸(1.8~2.0%)、過酸化水素(6%未満)、酢酸(20%)、無機酸、除錆剤



(注意)
製品ラベルに記載されている使用方法と
注意事項を確認してからご使用ください。

MEDITOOL
CORPORATION

●炭酸カルシウム溶解性


	プレモーブNA	プレモーブBC	酢酸	
濃度	1/100	1/100	1/200	1/500
pH	2.2	2.3	3.0	3.1
CaCO ₃ 溶解量	2.0g	1.8g	3.7g	1.6g

それぞれの試験液1Lに炭酸カルシウムを、0.1gずつ投入しスターで攪拌しながら溶解した。攪拌しても溶解できずに白濁する手前の添加量をCaCO₃溶解量とした。


●除錆効果

	プレモーブNA	プレモーブBC
濃度	1/100	1/100
浸漬時間	0分	10
	60分	3
	180分	0.5

プレモーブNA

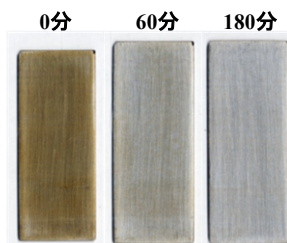


プレモーブBC

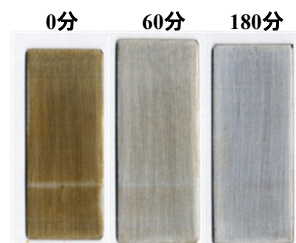


プレモーブNAの希釈液に次亜塩素酸ナトリウムでSUS304プレートを全面腐食させたテストピースを浸漬させ、浸漬時間経過後取り出し、目視により除去度合いを評価した。試験前の状態を10とし、試験後のテストピースの錆度合いを評価した。

●過酢酸成分安定性

・原液とタンク希釈液の安定性

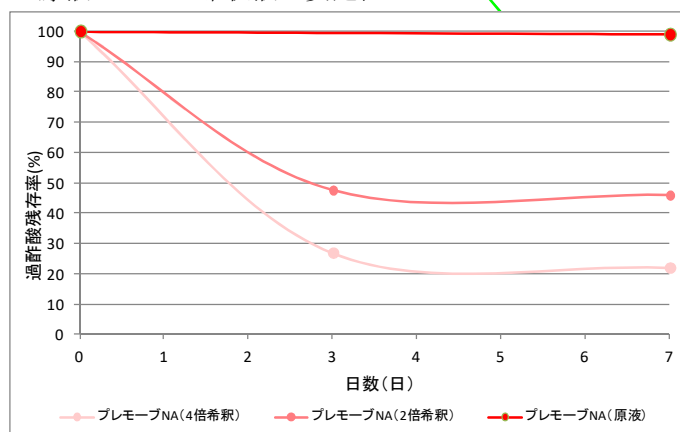

・末端希釈液の安定性

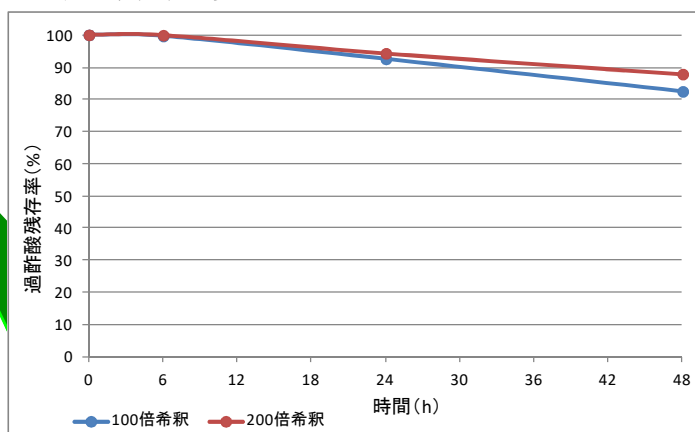

プレモーブNAについて、原液と、2倍、4倍の倍率に希釈し、密閉して、原液は40℃暗所に、希釈液は室温暗所に保管した。保管日数毎に過酢酸量を測定した。

プレモーブNAを100倍、200倍に希釈し密閉して、室温暗所に保管した。保管時間毎に過酢酸量を測定した。

保管/荷姿

- ◆ 有効期限: 未開封の状態では製造後1年間
- ◆ 内容量: 10kgタフテナー×1本/箱

発売元

**MEDITOOL
CORPORATION**

株式会社 **メディツール**

(本社) 福岡県みやま市瀬高町文廣1501-1

TEL (0944) 62-4753
FAX (0944) 62-4753

代理店

